



ANPASSLEITFADEN AMP

AMP SILIKONHÜLLE

Jedem AMP System liegen 2, den Gehörgang nicht verschließende Silikonhüllen je Größe (Small, Medium und Large) bei. Geschlossene Silikonhüllen können separat bestellt werden.

- In den meisten Fällen ist die Größe S (Small) zu empfehlen, sollte diese keinen Halt bieten, verwenden Sie die nächst größere Größe.
- Geschlossene Silikonhüllen sollten nur für stärkere Hörverluste verwendet werden.



BATTERIEWECHSEL

- AMP arbeitet mit einer Zink-Luft Batterie der Größe 10.
- Ist die Batterie korrekt eingesetzt, startet das System sofort.
- Die Batterie wird mit der abgerundeten Seite in Richtung der AMP Spitze eingesetzt. Die flache Seite der Batterie entspricht somit der flachen Seite des Systems. Die Batterie rutscht in die korrekte Position.
- Es wird empfohlen, die Batterie über Nacht herauszunehmen. Dazu muss die Silikonhülle entfernt werden.

AMP BEDIENEN – AMP WAND

Am schmalen Ende des AMP WAND Werkzeuges (im Lieferumfang enthalten) ist ein kleiner Magnet befestigt, der das System aus- und einschaltet sowie die Lautstärke justiert.

Ein schwacher Kontakt des Magneten mit AMP schaltet das System EIN bzw. AUS.

Dauerhafter Kontakt führt zu Veränderungen in der Lautstärke. Die einstellbare Reserveverstärkung beträgt 16 dB, sofern der Hörverlust dies zulässt. Bis zu 8 dB lauter und 8 dB leiser als die programmierte Einstellung. Die erste Veränderung durch das AMP WAND Werkzeug wird die Lautstärke um 4 dB verringern. Der weitere Kontakt senkt die Lautstärke um weitere 4 dB auf das Minimum ab. Erst bei längerem Kontakt wird im nächsten Schritt die Lautstärke um 4 dB erhöht.



AMP EINSETZEN UND HERAUSNEHMEN

Jedes AMP System ist mit einem weißen R (rechts) oder L (links) gekennzeichnet.

Die Rechts/Links Indikatoren sollten in einer Linie mit dem Haltegriff der Silikonhülle sein. Dieser liegt im Tragus der Ohrmuschel.

AMP PROGRAMMIEREN

Ein Anwendungsprogramm im Internet oder eine Applikation für das iPhone, iPod Touch oder iPad dienen der Programmierung des AMP. Der Zugang zu dem Anwendungsprogramm erfordert die Eingabe des Benutzernamens und ist Passwortgeschützt.

Benutzernamen und Passwort erhalten Sie über unseren Kundenservice.

Wir sind für Sie da:

Starkey-Kundendienst

José Arminio, Gilbert Goertz, Michael Jacobi,
Viola Kummerfeldt, Michael Sydow
Tel. 040 429473-350 • Fax 040 429473-255
E-Mail: customer_service@starkey.de

Starkey-Training

Gerd Bannert, Sylvie Gerber
Tel. 040 429473-350
Fax 040 429473-255
E-Mail: training@starkey.de