



A·M·PTM

PERSONAL AUDIO AMPLIFIER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Übersicht

Eigenschaften, Bedienelemente und Identifikation 3

Vorbereitung

Batterien 4

Batteriesignalton 6

Einsetzen und Herausnehmen 8

Nutzung

Ein- & Ausschalten 9

Lautstärkeeinstellung 10

Übersicht der Lautstärkeeinstellung 11

HörSystempflege

HörSystem Reinigung 12

Service und Reparatur 13

Problembeseitigung 14

Tipps zur besseren Kommunikation

Für Sie 15





Für Ihre Familie und Bekannten 16

Sicherheitshinweise und Garantie 17

Eigenschaften, Bedienelemente und Identifikation

1. Mikrofonöffnung
2. Schallaustritt (Hörer)
3. Batteriefach (EIN/AUS Funktion)
4. Haltegriff
5. Seriennummer
6. Silikonhülle
7. AMP Wand Werkzeug
 - a) Ein- /Ausschalten sowie Lautstärkeregelung
 - b) Optional Batterieentnahmehilfe

Rechts/Links Erkennung durch ein R bzw. L auf dem System.

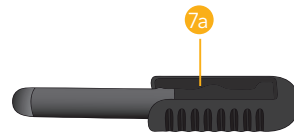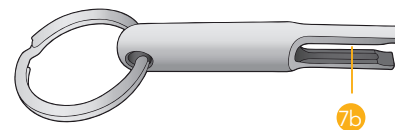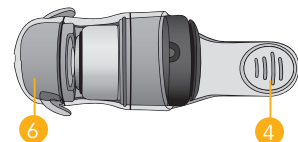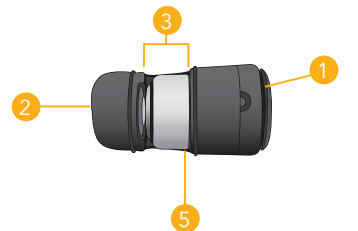


Batterien


Ihr HörSystem wird mit einer Zink-Luft Batterie der Größe 10 betrieben. Diese ist durch einen gelben Farbcode gekennzeichnet.

Batteriewechsel:


1. Entfernen Sie die Silikonhülle.
2. Entfernen Sie die leere Batterie mit Hilfe der Batterieentnahmehilfe des AMP Wand Werkzeuges oder drücken Sie die Batterie seitlich mit Ihrem Finger aus dem Batteriefach.
3. Entfernen Sie den gelben Aufkleber von der neuen Batterie.
4. Die "+" Seite (flache Seite der Batterie) zeigt beim Einsetzen in Richtung des "+" auf dem Gehäuse des HörSystems.
5. Setzen Sie AMP wieder in die Silikonhülle ein.

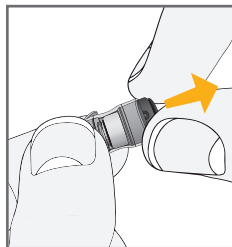


1

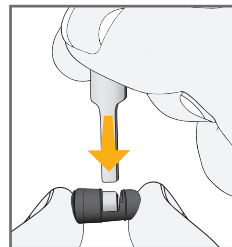

2

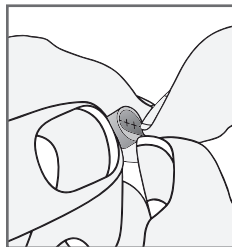

3

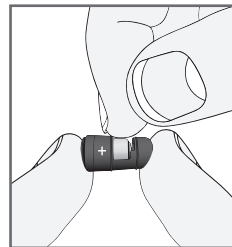

4

Batteriesignalton

Ein Batteriewarnsignalton zeigt Ihnen an, wenn die Betriebsspannung der Batterie zu niedrig ist. Wechseln Sie innerhalb von 5 Minuten die Batterie. Ein weiterer Signalton ertönt bevor Ihr HörSystem abgeschaltet wird.

** Die tatsächliche Zeit kann variieren und ist abhängig von den Umgebungsgeräuschen und der verwendeten Batteriemarke.*

Hilfreiche Hinweise

- Aufgrund der Größe der Batterie ist es sinnvoll den Batteriewechsel über einem Tisch vorzunehmen, um zu verhindern, dass diese oder das HörSystem herunterfällt.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien sofort in den dafür vorgesehenen Recycling Stellen.
- Da Batterien in Größe und Kapazität variieren können, holen Sie sich Rat bei Ihrem Hörgeräteakustiker. Dieser berät Sie zur Größe und Lebensdauer der Batterie.

Warnhinweise


- ⚠ Schlucken Sie niemals Batterien. Um dem vorzubeugen beachten Sie bitte folgende Hinweise:
- ⚠ Halten Sie Batterien fern von Kindern und Haustieren.
- ⚠ Prüfen Sie Ihre Medikamente vor der Einnahme. Batterien werden leicht mit Tabletten verwechselt.
- ⚠ Stecken Sie niemals Batterien in Ihren Mund oder andere Körperöffnungen.

Hilfreiche Hinweise

- Sollten Hautirritationen oder Entzündungen Ihres Ohres auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker.
- Sollten Sie eine allergische Reaktion durch das Tragen des HörSystems bekommen, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker.
- Bei starken Schwellungen, Ohrausfluss, verstärkter Cerumenproduktion oder anderen ungewöhnlichen Auffälligkeiten kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Hausarzt oder Hals-Nasen-Ohren Arzt.

Einsetzen und Herausnehmen**Einsetzen:**

1. Halten Sie das HörSystem mit Daumen und Zeigefinger am Haltegriff fest.
2. Schieben Sie das HörSystem vorsichtig mit der Spitze voran in Ihren Gehörgang. Mit dem Zeigefinger bringen Sie es in die richtige Endposition. Der Haltegriff liegt im unteren Bereich der Ohrmuschel auf.

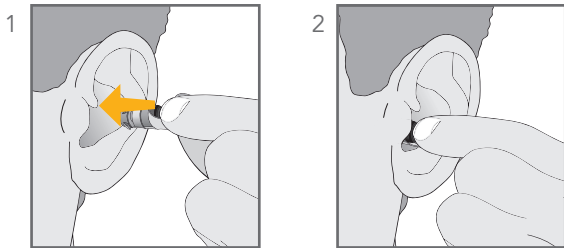**Herausnehmen:**


Greifen Sie den Haltegriff mit Daumen und Zeigefinger und Ziehen Sie das HörSystem sanft aus Ihrem Ohr.

Einschalten:

Führen Sie das magnetische Ende des AMP Wand Werkzeuges kurz an Ihr HörSystem und ziehen Sie es wieder weg. Eine Tonfolge zeigt Ihnen an, dass das System eingeschaltet ist.

Ausschalten:

Führen Sie das magnetische Ende des AMP Wand Werkzeuges an Ihr HörSystem und ziehen Sie es innerhalb einer Sekunde wieder weg. Eine Tonfolge zeigt Ihnen an, dass das HörSystem ausgeschaltet wurde.

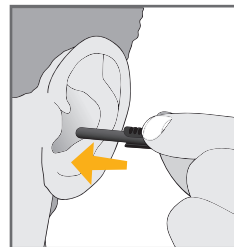

Lautstärkeeinstellung

Um die Lautstärke Ihres AMP Systems zu verändern, halten Sie das AMP Wand Werkzeug nah an das System. Die Lautstärkeveränderung erfolgt bei einem eingeschalteten System nach einem bestimmten Muster.

Nach dem Einschalten, wird die erste Veränderung in gleicher Weise stattfinden, wie beim letzten Gebrauch des AMP Wand Werkzeuges.


Halten Sie das Werkzeug solange an das oder in die Nähe des Systems, bis die gewünschte Veränderung eingetreten ist.

In Abhängigkeit von der individuellen Einstellung des Systems sind bis zu fünf Lautstärkeveränderungen möglich.

Jede Änderung wird durch einen Bestätigungston angezeigt.

Ihr System wurde durch Ihren Hörgeräteakustiker in eine individuell angepasste Grundeinstellung gebracht.

Sollte die Lautstärke grundsätzlich zu laut oder zu leise sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Hörgeräteakustiker.

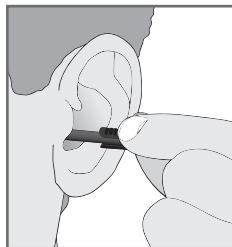**Übersicht der Lautstärkeeinstellung**

Lautstärkestufen	Ton
2 Stufen lauter als die Grundeinstellung	5 Töne und ein Bestätigungston
1 Stufe lauter als die Grundeinstellung	4 Töne
Grundeinstellung	3 Töne
1 Stufe leiser als die Grundeinstellung	2 Töne
2 Stufen leiser als die Grundeinstellung	1 Ton und ein Bestätigungston

HörSystempflege

Halten Sie Ihr HörSystem stets sauber. Hitze, Feuchtigkeit oder andere Substanzen können Ihr HörSystem beschädigen.

- Reinigen Sie das HörSystem über einer weichen Unterlage, um Beschädigungen durch Herunterfallen zu vermeiden.
- Entfernen Sie die Silikonhülle und reinigen Sie mit einer kleinen, weichen Bürste vorsichtig die Mikrofon- und Höreröffnung sowie das Batteriefach.
- Verwenden Sie NIEMALS Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten sowie Öle zur Reinigung Ihres HörSystems.
- Lediglich die Silikonhülle kann mit einem Reinigungsmittel gesäubert werden.

Ihr Hörgeräteakustiker berät Sie in Bezug auf die richtige Wahl des Reinigungsmittels und der Handhabung.

Hilfreiche Hinweise

- Entfernen Sie die Batterie aus dem System, wenn Sie es nicht benutzen und bewahren Sie es im mitgelieferten Etui auf:
 - an einem trockenen, sicheren Platz
 - ohne direkte Sonneneinstrahlung und extreme Hitze
 - wo Sie es leicht wiederfinden
 - fern von Kindern und Haustieren
- Zerlegen Sie Ihr HörSystem nicht in seine Einzelteile oder stecken Werkzeuge in die Systeme.

Service und Reparaturen

Sollte Ihr HörSystem aus irgendeinem Grund einmal nicht funktionieren, versuchen Sie nicht es selbst zu reparieren. Es besteht die Gefahr, dass Sie dem System schwerwiegendere Defekte zufügen. Im Falle einer Selbstreparatur erlischt der Garantieanspruch. Um einen möglichen Fehler zu finden und zu beheben, folgen Sie der nachfolgenden Anleitung zur Problembeseitigung. Sollte der Fehler weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker.

Problembeseitigung

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Zu Leise	Schwache Batterie	Wechseln Sie die Batterie
	Cerumen oder Feuchtigkeit an Mikrofon oder Hörer	Reinigen Sie beides mit einer kleinen, weichen Bürste
		Entfernen und Reinigen Sie die Silikonhülle
	Hörverlust hat sich geändert	Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker
Ungleichmäßige Leistung	Schwache Batterie	Wechseln Sie die Batterie
Verzerrter Klang	Schwache Batterie	Wechseln Sie die Batterie
	Defektes HörSystem	Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker
HörSystem tot	Schwache Batterie	Wechseln Sie die Batterie
	Cerumen oder Feuchtigkeit an Mikrofon oder Hörer	Reinigen Sie beides mit einer kleinen, weichen Bürste. Entfernen und Reinigen Sie die Silikonhülle.

Ihr Hörgeräteakustiker wird Ihnen eine Empfehlung aussprechen, wie Sie sich bestmöglich an Ihr HörSystem gewöhnen. Es braucht Übung, Zeit und Ausdauer, bis sich Ihr Gehirn an die neuen Geräusche, die Ihnen die neuen HörSysteme bieten, gewöhnt hat. Hören ist nur ein Teil dessen, wie wir Gedanken, Ideen und Gefühle austauschen. Von den Lippen ablesen, Mimik und Gestik können den Lernprozess fördern und das ergänzen, was durch die Verstärkung alleine nicht verstanden wird.

Bitte beachten Sie die folgenden Kommunikationshinweise:

Für Sie

- Setzen Sie sich näher zu dem Sprecher und sehen Sie ihn an.
- Setzen Sie sich in einem ruhigen Raum gegenüber.
- Probieren Sie verschiedene Orte aus, um die beste Hörsituation für sich herauszufinden.
- Vermeiden Sie Ablenkungen.
- Hintergrundgeräusche können zu Anfang frustrierend sein. Denken Sie daran, dass Sie diese lange nicht gehört haben.

- Lassen Sie andere wissen, was Sie brauchen; denken Sie daran, dass andere Ihren Hörverlust nicht „sehen“ können.
- Entwickeln Sie realistische Vorstellungen dazu, was Ihre HörSysteme können und was nicht.
- Besseres Hören mit HörSystemen können Sie erlernen.

Für Ihre Familie und Bekannte:

Ihre Familie und Ihr Bekanntenkreis sind ebenfalls von Ihrer Hörminderung betroffen.

Bitten Sie sie:

- Ihnen Ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken, bevor Sie zu sprechen beginnen.
- Sie beim Sprechen anzusehen oder sich in einem ruhigen Raum Ihnen gegenüber zu setzen.
- Mit klarer Stimme und einer normalen Lautstärke und Geschwindigkeit zu sprechen. Schreien kann das Verstehen erschweren.
- Sätze umzuformulieren anstatt die Worte zu wiederholen; es kann sein, dass andere Worte besser verstanden werden.

Sicherheitshinweise

Die HörSysteme sind unter Berücksichtigung der Standards für Internationale Elektromagnetische Kompatibilitätskriterien entwickelt worden. Trotzdem besteht die Möglichkeit von Störungen verursacht durch Metalldetektoren, Elektromagnetische Felder, Medizinische Geräte, Radiowellen und elektrostatische Entladungen.

Sollten Sie implantierte Medizinprodukte wie einen Defibrillator oder Herzschrittmacher tragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Facharzt bzw. den Hersteller des Medizinproduktes um mögliche Risiken vorab zu klären.

Sollten Sie sich einer MRI oder MRT Behandlung unterziehen müssen, wird zwingend empfohlen die HörSysteme abzulegen.

Gesetzeshinweise

Hinweis gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz

Geben Sie unbrauchbare HörSysteme unbedingt an Ihren Hörgeräte-Akustiker oder eine andere autorisierte Entsorgungsstelle für Elektroaltgeräte zurück.

HörSysteme enthalten elektronische Bauteile und dürfen aus diesem Grund niemals mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Zur fachgerechten Entsorgung gelten die gesetzlichen Bestimmungen.



Gewährleistung

Die Firma Starkey Laboratories (Germany) GmbH gewährleistet innerhalb der Gewährleistungsfrist die kostenlose Beseitigung von Mängeln, die nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.

Von der Gewährleistungsfrist ausgeschlossen sind Fehler aufgrund unsachgemäßer Behandlung, Fremdeingriffen und ausgelaufener Batterien.

HörSysteme werden durch ständiges Tragen stark beansprucht. Das lässt sich kaum vermeiden, denn Sie sollten Ihr HörSystem möglichst häufig tragen. Damit Ihr HörSystem trotzdem immer für Sie betriebsbereit bleibt und gut funktioniert, empfehlen wir eine regelmäßige vierteljährliche Wartung.

Aber auch die tägliche Reinigung und richtige Handhabung sind sehr wichtig.

Uns sind zufriedene Kunden sehr wichtig. Damit Sie auch zufrieden bleiben, wollen wir Sie rundum optimal betreuen und bieten Ihnen hierfür verschiedene Serviceprogramme.

Ihr Hörgeräte-Akustiker berät Sie gerne.

Hersteller:

Starkey Laboratories, Inc.
World Headquarters
6700 Washington Ave. So.
Eden Prairie, Minnesota MN 55344, USA

Autorisierte Europäische Vertretung:

Starkey Laboratories, Ltd.
William F. Austin House
Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove
Stockport, Cheshire, United Kingdom, SK7 5BX

Vertrieb:

Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218 - 222
22335 Hamburg
www.starkey.de

CE 0086



Besser hören, mehr vom Leben

Ein Weltweites Unternehmen mit Hauptsitz
in Eden Prairie, Minnesota, USA
Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washigton Avenue S.
Eden Prairie, MN 55344
www.starkey.com

Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
www.starkeypro.de, www.starkey.de

© 2010 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten

84689-000 10/10 BKL0226-00-EE-ST Rev. A