

Herzlichen Glückwunsch!
In zwei einfachen Schritten
zur Thrive App: Ihrem
persönlichen HörAssistenten



Thrive App – für Apple

1. Schritt:

Laden Sie die Thrive App aus dem Apple Store herunter.
Suchen Sie hierzu nach der „Thrive App“.

Kompatibilitätsliste:

<https://www.starkey.de/hoergeraete/apps>

2. Schritt:

Kopplern Sie Ihre Hörsysteme mit dem Smartphone.

Batteriefach der Hörsysteme auf und zu/von der Ladestation
entnehmen > neben Smartphone platzieren

- > iPhone-Einstellungen > Bedienungshilfen > Hörhilfen
- > Ggf. Bluetooth einschalten > Tippen Sie auf den Vornamen
- > Kopplungsanfrage bestätigen > Thrive App öffnen

Die Kopplung muss nur einmalig durchgeführt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen Hörsystemen
und Ihrem persönlichen HörAssistenten.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden
Sie auf: [https://www.starkey.de/
hoergeraete/apps](https://www.starkey.de/hoergeraete/apps) oder mit dem QR-Code
(Smartphone-Kamera öffnen)



Herzlichen Glückwunsch!
In zwei einfachen Schritten
zur Thrive App: Ihrem
persönlichen HörAssistenten



Thrive App – für Android



1. Schritt:

Laden Sie die Thrive App aus dem Google Play Store herunter. Suchen Sie hierzu nach der „Thrive App“.

Kompatibilitätsliste:

<https://www.starkey.de/hoergeraete/apps>

2. Schritt:

Koppeln Sie Ihre Hörsysteme mit dem Smartphone.

Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth einschalten >
Batteriefach der Hörsysteme auf und zu/von der Ladestation
entnehmen > neben Smartphone platzieren
Öffnen Sie die Thrive App > Kopplungsanfrage bestätigen

Die Kopplung muss nur einmalig durchgeführt werden. Wir
wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen Hörsystemen
und Ihrem persönlichen HörAssistenten.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden
Sie auf: [https://www.starkey.de/
hoergeraete/apps](https://www.starkey.de/hoergeraete/apps) oder mit dem QR-Code
(Smartphone-Kamera öffnen)

