

PROGRAMMIER- HINWEISE

Software Inspire

März 2015



HINWEISE ZUR ERSTEN PROGRAMMIERUNG:

Sie können unsere Hörsysteme klassisch per Kabel anpassen oder für Systeme mit Funktechnologie komfortabel drahtlos programmieren – HörSysteme mit 900MHz sync Technologie über den SurfLink Programmer und Halo Made for iPhone Systeme über den TruLink Programmer.

Beim ersten Anschließen startet der Autopfad selbstständig und die HörSysteme sind stumm geschaltet. Selbstverständlich können Sie auch erst die Voreinstellung über Best Fit manuell vornehmen bevor Sie die HörSysteme ins Kundenohr setzen.


Beispiel: Programmierung über Programmierschuh

Tipp: Wir empfehlen die drahtlose Programmierung über unseren SurfLink bzw. TruLink Programmer.

Programmieren Sie mit Batterie, dem passenden Programmierschuh und unsere lila Starkey Programmierkabel.

1. Starten Sie die Inspire Anpasssoftware, bevor Sie die Systeme anschließen.
2. Klicken Sie den Programmierschuh auf der Unterseite der HörSysteme auf.
3. Verbinden Sie das Starkey Programmierkabel mit dem Programmierschuh. Ein Punkt kennzeichnet die Einsteckrichtung.

Ist Inspire schon geöffnet, werden die Systeme sofort erkannt. Sie können nun die Anpassung starten.

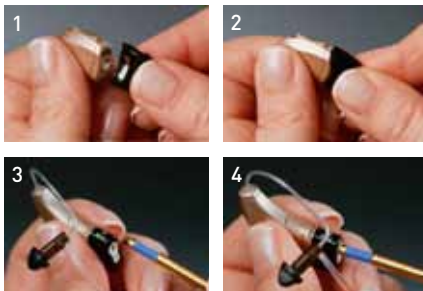


Beispiel: Programmierung über Flex Adapter

Tipp: Wir empfehlen die drahtlose Programmierung über unseren SurfLink bzw. TruLink Programmer.

Programmieren Sie ohne Batterie über unseren Inspire IdO Flex Adapter (Artikel-Nr.: 65464-000) und unsere lila Starkey Programmierkabel.

1. Starten Sie die Inspire Anpasssoftware, bevor Sie die Systeme anschließen.
2. Öffnen Sie das Batteriefach.
3. Schieben Sie den Flex Adapter mit den Kontakten vom Körper weg in den Schlitz im Batteriefach unterhalb der Modellbezeichnung.
4. Schieben Sie die Kontakte bis zum Anschlag der orangenen Plastikbegrenzung in das Gerät.
5. Verbinden Sie nun das Starkey Programmierkabel.

Ist Inspire schon geöffnet, werden die Systeme sofort erkannt. Sie können nun die Anpassung starten.

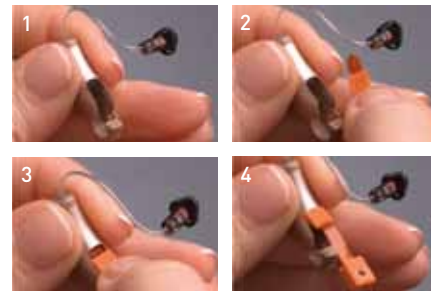

Software Inspire

Programmieren Sie diese HörSysteme bitte mit der Anpass-Software **Inspire 2015.1 oder höher**

Halo Made for iPhone

wird ergänzt um eine zusätzliche Bauform, dem Halo HdO 13. Innovative Technologien wie die Acuity Directionality oder der Auto Experience Manager runden zusammen mit der TruLink Hearing Control App das Höchstmaß an Komfort und Individualisierung ab. Auch das Halo RIC 13 kann über die Inspire 2015.1 um diese Technologien per Knopfdruck erweitert werden.

Die TruLink Hearing Control App ist für iOS Endgeräte und NEU auch für Android Smartphones wie das Samsung Galaxy S4 und S5 erhältlich.



Z Series - Hörsysteme für Hörgesundheit

Die neue Z Series hält in einer kompletten HörSystemfamilie viele Neuerungen und herausragende Technologien bereit. Die drahtlose Produktfamilie umfasst die Bauformen: CIC, ITC, ITE als custom made Modelle. 2 Receiver-In-Canal Modelle als mRIC 312 (micro RIC) und RIC 312 sowie die HdO Modelle 312, 13 und NEU: Power Plus 13 mit einer Matrix von 140/80.

Z series



Nähere Informationen finden Sie unter www.starkeypro.de/inspire/ueberblick

Sie haben Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen werktags von 9:00 bis 17:30 Uhr unter der Telefonnummer 040 429473-350 zur Verfügung.