

QUICKTIP

2-Wege Audio

Streaming zu 2,4 GHz Hörsysteme

Mit unseren 2,4-GHz-Hörsystemen der Thrive-Plattform nehmen die Mikrofone der Hörsysteme die Stimme auf und übertragen sie direkt an iPhone und iPad, so dass die Nutzer nahtlos freihändig sprechen können.

Kompatibilität

Alle 2,4GHz Hörsysteme der Thrive Plattform

Hinweis: Die Hörsysteme benötigen die folgende Firmwareversion:

ITC/ITE R, micro RIC 312, HdO R: 7.5.1.0 oder höher

RIC 312, RIC R, BTE 13 (70 gain): 6.11.1.0 oder höher

iOS 15.1 oder neuer


iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max und nachfolgende, iPhone SE (2te Generation), wie auch iPad Pro 12.9-inch (5te Generation), iPad Pro 11-inch (3te Generation), iPad Air (4te Generation) und iPad mini (6te Generation)



Apple-Geräte-Setup

Bedienung über das Kontrollzentrum und die Grundeinstellungen

2-Wege Audio wird ausschließlich über die Apple-eigenen Steuerelemente gesteuert. Die Steuerelemente können über einen Dreifachklick oder über das Kontrollzentrum aufgerufen werden. 2-Wege Audio ist mit dem entsprechenden Eingang (Lautsprecher, Kopfhörer, Hörsysteme) beschriftet.

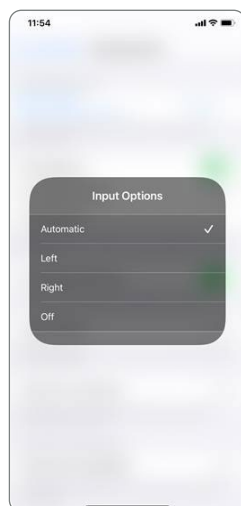

Apple-Geräte-Setup

2-Wege Audio Eingangs-Optionen

Automatisch: Das Hörsystem mit der stärksten Verbindung zum iPhone oder iPad wird ausgewählt und für die Sprachaufnahme während eines Anrufs verwendet.

Links: Das linke Hörsystem wird während eines Anrufs immer zur Sprachaufnahme verwendet.

Rechts: Das rechte Hörsystem wird während eines Anrufs immer für die Sprachaufnahme verwendet.

Aus: Hörsystemträger müssen bei Telefonaten in das Mikrofon des iPhones oder iPads sprechen. Der Ton des Anrufs wird weiterhin an die Hörsysteme gestreamt.

HINWEIS: Diese Einstellung kann während eines aktiven Telefonats nicht geändert werden.

Steuerung des Hörsystems





Das Hinzufügen des Symbols Hören zum Kontrollzentrum ermöglicht den direkten Zugriff auf verschiedene Hörsystemfunktionen.

So fügen Sie das Symbol "Hören" zum Kontrollzentrum hinzu:

- 1 Vom Homebildschirm Einstellungen auswählen, Menü Kontrollzentrum
- 2 Funktion "Hören" mit dem grünen + zum Kontrollzentrum hinzufügen
- 3 Das Hören Symbol ist nun im Kontrollzentrum angeheftet

Das Kontrollzentrum erlaubt folgende Zugriffe:

- Batteriestatus
- Lautstärkeeinstellung
- Programmauswahl
- Hintergrundgeräusche
- Live Hören
- Audio Eingangsoptionen

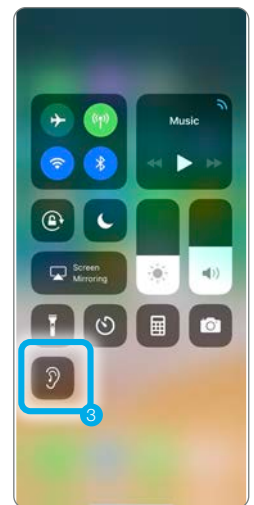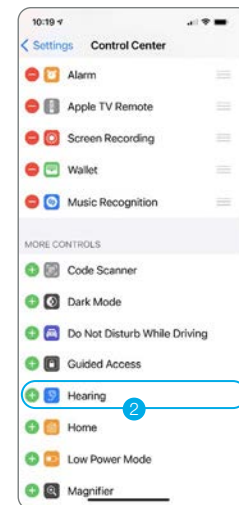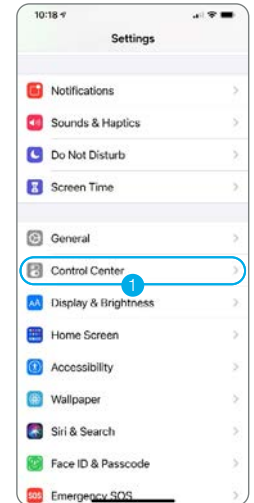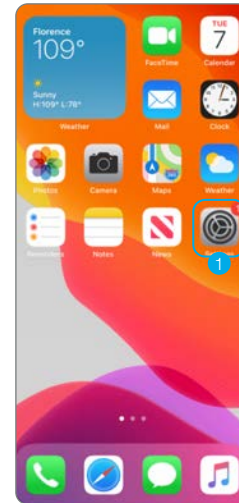

2-Wege Audio verwenden

2-Wege Audio kann sowohl für Telefonanrufe als auch mit anderen Apps wie FaceTime, Teams und Zoom verwendet werden.

Wenn ein Telefonanruf eingeht, nehmen Sie den Anruf auf dem iPhone oder iPad an.

2-Wege-Audio wird basierend auf der im Kontrollzentrum ausgewählten Eingangsoption gestreamt.

Für ein optimales Streaming-Erlebnis sollte sich das iPhone oder iPad in einem Umkreis von ca. 3 Metern vom Benutzer befinden.

Die App kann je nach Telefon und/oder Hörsystemmodell etwas anders aussehen.